

MW61



NUEVO

Simulador de Examen de Ojo Digital (3 pasos)


MW61A



Simulador de Examen de Ojo Digital (2 pasos)

Simulador de Examen de Ojo Innovador

Nuestro Simulador de Examen de Ojo estándar se utilizan en muchos centros de simulación. Esta versión digital del Simulador de Examen de Ojo es una mejora que se destaca con varias características innovadoras.

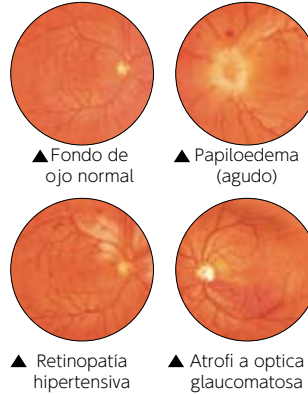

Selección con el botón La pantalla posterior permite al instructor monitorear a los estudiantes y dar seguimiento de los casos durante examinación.

FEATURES

- 40 casos de imágenes de fondo (incluyendo 10 enfermedades comunes) son preinstaladas para el entrenamiento de examen de ojo, los cuáles se demuestran en el monitor de 160dpi
- Imágenes del fondo personalizadas pueden ser programadas en el simulador vía USB
- Para el entrenamiento de examen de ojo con cualquier tipo de oftalmoscopios directos
- Las imágenes de fondo preinstaladas son obtenidas de casos actuales de manera que reproduzcan adecuadamente las vistas representativas y precisas de la unidad ocular
- Unidades de globo ocular con lente que simulan el eje visual de los ojos reales
- Material blando y suave que reproduce el contorno del párpado realista

SKILLS

Examen de fondo de ojo con oftalmoscopio real

CASES

- Fondo normal
- Retinopatía hipertensiva: vasoconstricción arterial del 3er grado, arteriosclerosis de 1er grado, hemorragias y focos algodanosos, oclusión de las venas sencilla
- Retinopatía diabética no proliferativa: microaneurisma, hemorragias y exudados duros
- Papiledema (crónico)
- Papiledema (agudo)
- Atrofia optica glaucomatosa: ahuecamiento del disco óptico glaucomatoso y defecto de fibra nerviosa
- Oclusión de las venas retinianas (aguda): hemorragia en forma de llama y focos algodanosos
- Oclusión de las venas retinianas (después de la fotocoagulación con láser)
- Toxoplasmosis: coriorretinitis
- Degeneración macular senil: exudados maculares y hemorragia subretinal
- 3 tipos de Excavación del nervio óptico | Enlarged optic disc recess (Tilted disc)
- Excavación del nervio óptico (papila inclinada)
- 2 tipos de Drusen
- 2 tipos de Excavación del nervio óptico con Drusen
- Drusen macular
- Hemorragias de disco óptico

NUEVO CASOS

- Hemorragia
- 2 tipos de Atrofia a coriorretiniana
- 4 tipos de Opacidades vítreas
- 2 tipos de Defectos de la capa de fibras nerviosas
- Pigmentación
- Hemorragia con revestimiento de los vasos
- Fotocoagulación
- 3 tipos de Membrana epirretiniana
- Queratocono
- Degeneración macular
- Megalopapila; exudado

DESCRIPTIONS

Para conocer los códigos de producto de las versiones de tonos de piel alternativos de este modelo, visite a nuestra página web www.kyotokagaku.com.

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A42 x P21.5 x A38 cm / A16.5 x P8.5 x A15 plg. Peso: 2.5kg / 5.5lb
Consumo de energía: 2.5W

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|--|--|
| 1 maniquí de cabeza y hombros | 1 unidad flash USB (con instalador de casos) |
| 1 perla de cambio de tamaño pupilar | 1 manual de instrucciones |
| - 3 pasos (2, 3.5, 5mm en diámetro) | |
| - 2 pasos (3.5, 8mm de diámetro) | |
| 1 cable de alimentación / cable de USB | |

MATERIALS

*Latex está incluido en soplador.

SET VARIATIONS

- | | |
|-------------|---------------------------|
| 11444-000 | MW61 tono de piel claro |
| 11444-000-D | MW61 tono de piel oscuro |
| 11444-000-M | MW61 tono de piel medio |
| 11444-999 | MW61A tono de piel claro |
| 11444-999-D | MW61A tono de piel oscuro |
| 11444-999-M | MW61A tono de piel medio |

*Oftalmoscopio no está incluido.