

●仕様

足部本体	爪、胼胝、鶏眼
形 状：足部モデル	形 状：病変モデル
サイズ：成人・実物大	サイズ：成人・実物大
材 質：軟質特殊樹脂	材 質：硬質特殊樹脂

●商品構成

足部本体（専用台共）	1 台
爪（肥厚・巻き爪）	20 個
爪（肥厚・爪白癬）	20 個
胼胝	10 個
鶏眼	10 個
取扱説明書	

●交換部品

交換部品セット

11273-020
1 セット

爪（肥厚・巻き爪）	20 個
爪（肥厚・爪白癬）	20 個
胼胝・鶏眼	各 10 個
計	60 個セット

個別交換部品

爪（肥厚・巻き爪）

爪（肥厚・巻き爪）20 個
11273-030

爪（肥厚・爪白癬）

爪（肥厚・爪白癬）20 個
11273-040

胼胝（たこ）

胼胝（たこ）10 個
11273-050

鶏眼（うおのめ）

鶏眼（うおのめ）10 個
11273-060

関連製品

医療用フットケア スターターセット(6点)

Ref-1 12198-010 ￥お問い合わせください

- ① 医療用爪切りニッパー 15cm
- ② 角切りニッパー 11.5cm
- ③ ゾンデ ノーマル
- ④ ステンレス爪やすり
- ⑤ クレド(コーンカッター)
- ⑥ クレド用替え刃(100枚切り)



収納ケース

Ref-2 12198-020

￥お問い合わせください

ニッパー・クレド・
ゾンデなどの収納用
アルミケースです。



その他のフットケア用品の取り扱いもございますので、お問い合わせください。

DVD 看護におけるフットケア 全3巻

12971-650 ￥87,000 (税別)

医療従事者にとってのフットケアは、「少しでも長く歩ける足を守り、足から全身を診る」ことです。また、臨床でのフットケアは、患者との信頼関係を深めたり、気持ちを前向きにしQOLを向上させる効果が期待されます。このDVDは看護師が行うことのできるフットケアの基礎知識と基礎技術を学習するために役立つものです。



- ① 足を理解する (33 分)
- ② フットケアの基礎技術 (24 分)
- ③ 患者へのフットケア指導と靴選び (24 分)

各巻 ￥29,000 (税別)

※DVDの詳細については、オンラインカタログ：<http://www.kyotokagaku.jp> の検索欄にコード番号（例：12971-650）を入力してご覧ください。

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル 2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

Medical Foot Care Model

メディカルフットケアモデル

フッティー

M66 11273-000 ￥お問い合わせください

足のアセスメントからケア技術まで いい足めざし 一足二長



監修・協力：京都大学名誉教授


関西看護医療大学 学部長 教授 江川 隆子

● 特長

大切な足を生涯守る「フットケア」！その実践にむけたトレーニングモデルです。巻き爪、肥厚爪（爪白癬）、胼胝、鶏眼などの病変を付け替えることで、フットケアトレーニングが繰り返し行えます。

足部の皮膚や関節の正確な再現により、足のアセスメント（観察方法と手順）などフットケアに関する様々な実習が可能です。

● 実習項目

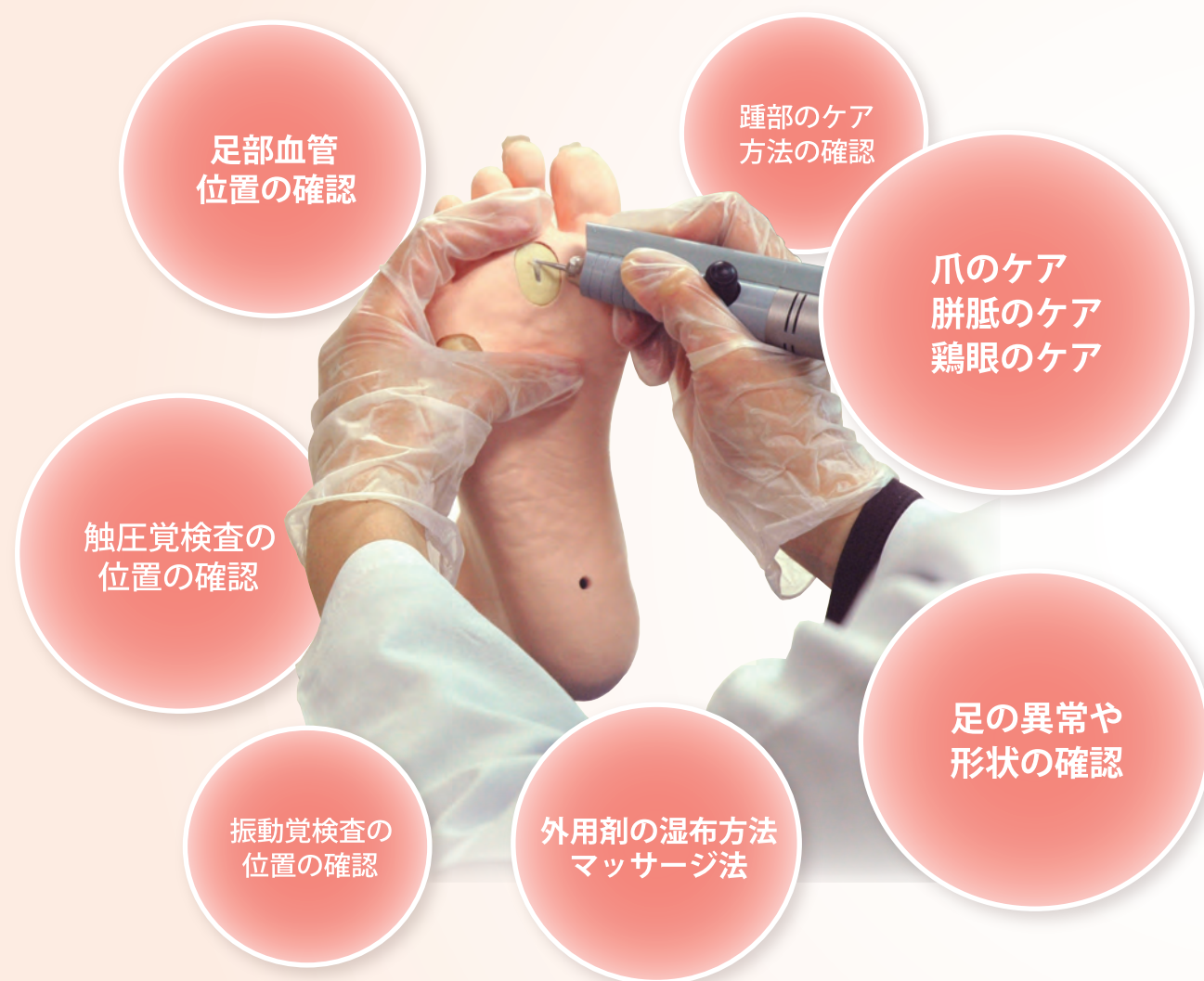

フットケア技能の習得に関するシミュレータモデルの有用性

今回、フットケアモデルの開発にあたっては、このモデルを使用したフットケア技能教育プログラムの有用性も検証しています。ナースを対象に、フットケアモデルを使用した実習プログラムと使用しない実習プログラムを行い、フットケア技能の習得具合を比較しました。

研究結果からも、フットケアモデルを利用した場合の方が、爪形状や胼胝、鶏眼に関する処置が適切に行えることが明らかになりました。

京都大学名誉教授
関西看護医療大学 学部長 教授 江川 隆子

○ 爪のケア



① 爪と皮膚の間の角質化した部分をグラインダーやフックで取り除きます。

② 次に肥厚した爪の表面をグラインダーやヤスリを使い、全体が薄く滑らかになるように削っていきます。

③ 爪の伸びた部分をニッパー型爪切りでスクエアカットします。特に巻き爪の場合はカーブに沿って少しずつ切り進め、角を切り落とさないようにします。

④ 爪切り後、グラインダーやヤスリを使って切り口を滑らかに整えます。

○ 胼胝（たこ）のケア



① 専用のコーンカッターで硬く角質化した部分を削ります。

② その後グラインダーやヤスリで表面を滑らかにします。

○ 鶏眼（うおのめ）のケア



① 鶏眼の角質塊の部分をグラインダーやヤスリで削り込んでいきます。



○ その他のフットケア実習項目

- ・ 足部の傷や腫れの有無、色調の変化、足底部のアーチの変形の有無などを観察
- ・ 外用剤の塗布方法、マッサージ法
- ・ 踵部の乾燥や角質化に対するケア方法の確認
- ・ 足部の血管位置の確認（足背動脈、後頸骨動脈の触診場所）
- ・ 触圧覚検査でモノフィラメントをあてる位置の確認
- ・ 振動覚検査で音叉をあてる位置の確認

