

褥瘡シミュレータ

型番	コードNo
MW63	11446-000フルセット
	11446-100 ベーシックセット

構成	11446-000	11446-100
ボディ	○	○
仙骨部褥瘡パッド		
ステージ II		
ステージ III	○	○
ステージ IV (肉芽あり)		
ステージ IV (ポケットあり)		
坐骨部褥瘡パッド ステージ IV	○	○
エコーパッド 2種セット	○	-
壊死組織の除去セット	○	-
消耗品セット (模擬膿、模擬血液、 模擬滲出液、模擬壊死組織)	○	○
収納ケース	○	○
取扱説明書	○	○




11446-000



11446-100

■ 本体	
本 体	成人腰部モデル
大 き さ	W44×D40×H38cm(腰部モデル本体)
材 質	軟質特殊樹脂/硬質特殊樹脂
重 量	約 3.8kg (パッド装着時)

褥瘡シミュレータ

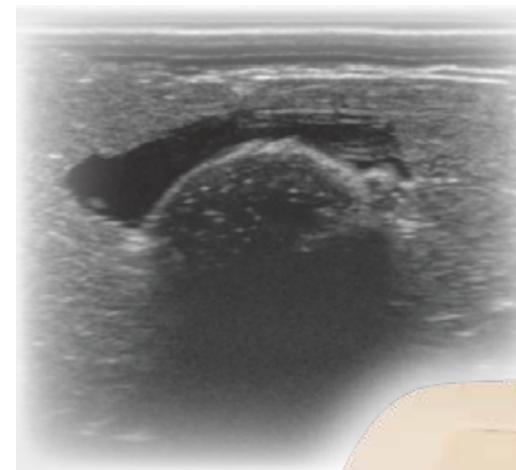

交換部
品



消耗品セット (模擬膿/模擬血液/
模擬滲出液/模擬壊死組織)
11446-010

模擬膿 (液体)
2 個組 各 100 ml
11446-020

模擬滲出液 (液体)
2 個組 各 100 ml
11446-030

模擬血液 (液体)
2 個組 各 100 ml
11446-040

模擬壊死組織
1 個組 50g
11446-050

別売部
品



壊死組織の除去セット
11446-200

壊死組織の除去ベース
11446-210

壊死組織の除去パッド
4 個組
11446-220

エコーパッド 2 種セット
(正常/水腫)
11446-070

※セット単体でのご使用も可能です

※リニアプローブ対応。
モデル坐骨部に設置して使用できます。

● 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
● このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.06

取扱店

製造元

KYOTO KAGAKU URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北畠小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075



POINT

1 スケールを用いた

褥瘡の評価

A. 仙骨部では、ステージⅡ～Ⅳまでを再現。スケールに沿った客観的評価を行うことができます。




真皮までの損傷



全層組織欠損




全層組織欠損
肉芽を再現

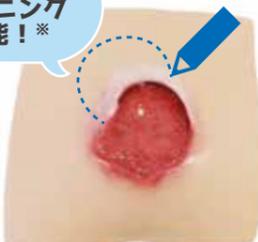

皮下組織を越える損傷
ポケット・骨の露出も再現

マーキングの
トレーニング
も可能！*

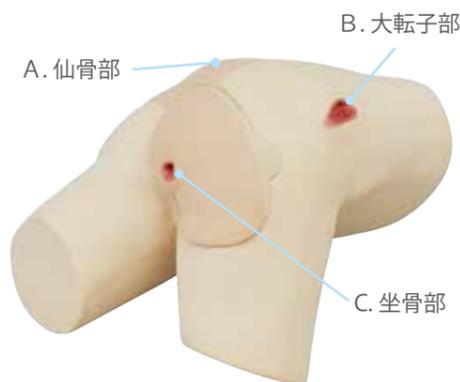

例) DESIGN-R® 2020 を用いた評価では、ステージの異なるパッドと創部再現キットを組み合わせて7項目全てをトレーニングできます。

Depth 深さ

Exudate 滲出液

Size 大きさ

Inflammation / Infection 炎症 / 感染

Granulation 肉芽組織

Necrotic Tissue 壊死組織

Pocket ポケット

一般社団法人 日本褥瘡学会 改定 DESIGN-R®2020
http://www.jspu.org/jpn/member/pdf/design-r2020_doc.pdf (2021年4月時点)


*パッド部分は油性ペンで繰り返し書いて消すことが可能です。

POINT


2 エコーを用いた

皮下軟部組織の観察

坐骨部では、お手持ちの超音波装置を使って、深部組織の観察をトレーニングできます。正常と水腫の2種類をご用意。

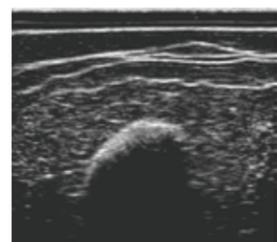

正常

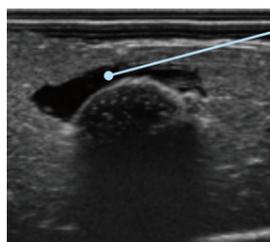

水腫



POINT

3 予防と創部ケア

洗浄やドレッシング材の貼付



洗浄できる



貼付できる


創部の洗浄や、ドレッシング材の貼付、外用薬の塗布や陰圧閉鎖療法の手順をトレーニングすることができます。

POINT

4 より実践力を高めるために

忠実な質感の再現

滲出液や壊死組織の質感を忠実に再現できるキットが付属。言葉や写真だけでは伝えることが難しかった様々な創部の状態を、再現することができます。

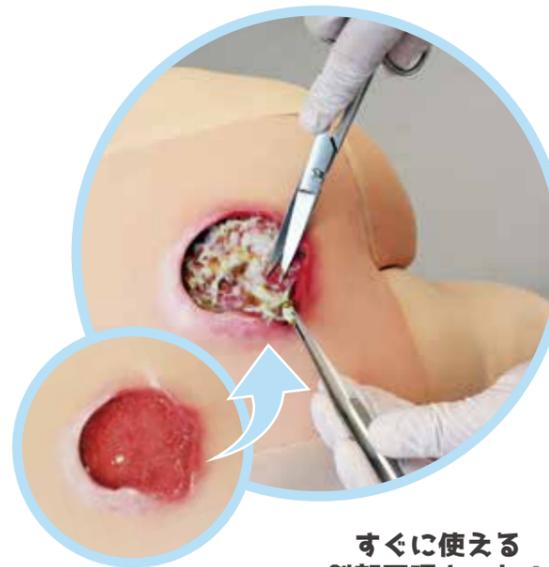

すぐに使える
創部再現キット！



監修・指導 神戸大学医学部 形成外科学教室 教授 寺師浩人
前 神戸学院大学 教授 杉元雅晴
神戸大学医学部附属病院 看護部 野口まどか

- | | | |
|------|-----------------------|-----------|
| 実習項目 | DESIGN-R® 2020 を用いた評価 | 外用薬の塗布 |
| | 創部の触診 | 陰圧閉鎖療法の手順 |
| | エコー撮像法を用いた観察(坐骨部の水腫) | デブリードマン |
| | 創および創周囲の洗浄 | 褥瘡予防 |
| | ドレッシング材の貼付 | |