

点滴静注シミュレータ “Vライン”

型番	コードNo	価格
MW9	11388-000	¥132,000(税別¥120,000)

■ 構成

腕モデル本体	1点	着色用綿棒(赤) 10本組	1点
手背静脈部 注射パッド	2点	専用バッグ	1点
前腕正中皮静脈部注射パッド	2点	取扱説明書	
模擬血液用ボトル設置台	1点		
模擬血液用ボトル	1点	■ 仕様	
輸液セット/輸液袋	各1点	本体	成人腕モデル
点滴静注シミュレータ器具セット	5名分	大きさ	約 W52×D10×H10cm (モデル本体)
ディスポカップ	1点	重量	0.9kg
シリンジ(50mL・ロック式)	1点	材質	軟質特殊樹脂

実習用推奨器具 ■ 静脈留置針 23G ■ 翼状針 23G

交換部品



11388-200 前腕正中皮静脈部注射パッド (2個組) ¥16,500 (税別¥15,000)	11388-300 手背静脈部注射パッド (2個組) ¥15,400 (税別¥14,000)	11388-400 着色用綿棒(赤) 10本組 ¥3,300 (税別¥3,000)	MY-8 12022-800 点滴静注シミュレータ器具セット (5名分) ¥17,600 (税別¥16,000) ※管理医療機器(クラスII)
--	---	--	---

関連製品



実習用アンプル・実習用バイアル

注射法による薬剤投与の実習に必要な模擬アンプルと模擬バイアルを製品化しました

KNG-1 12023-100 実習用アンプル 20mL (注射液タイプ) 100本入 ¥27,500 (税別¥25,000)	KNG-2 12023-200 実習用アンプル 5mL (注射液用蒸留水タイプ) 100本入 ¥27,500 (税別¥25,000)	KNG-3 12023-300 実習用バイアル (注射液タイプ) 100本入 ¥33,000 (税別¥30,000)	KNG-4 12023-400 実習用バイアル (溶解薬剤タイプ) 100本入 ¥33,000 (税別¥30,000)
---	--	--	---

注射針/注射器の実習用サンプルセット

MY-5 12022-500 ¥121,000 (税別¥110,000)
臨床で使用されている注射器や注射針、輸液ライン等の器具を実習時の事前学習用にセットしました。



No.1 シリンジの種類と名称 No.2 注射針の種類と用途 No.3 輸液ラインの取り扱い方 No.4 注射針 性能を確認できるセット

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外觀など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.06

取扱店

製造元

KYOTO KAGAKU URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場 〒612-8388 京都市伏見区北裏小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

点滴静注シミュレータ “Vライン”

刺入部位の確認から薬剤投与まで
末梢静脈路確保の技術を確実に身につける



2か所の部位で演習可能
前腕正中皮静脈部
手背静脈部(背側中手静脈)





2か所の部位で演習可能



前腕正中皮静脈部

手背静脈部
(背側中手静脈)

Point 01 基本に忠実

末梢静脈路確保の技術を確実に身につける

一連の手技を網羅できるよう、細部までリアリティを追求しました

- 01 駆血帯を巻く
- 02 刺入部位の確認
- 03 刺入部位の消毒
- 04 静脈留置針の刺入
- 05 刺入時の逆血確認
- 06 静脈圧迫操作と内針抜去
- 07 輸液チューブの接続
- 08 輸液の自然滴下確認
- 09 静脈留置針の固定
- 10 側注管からの薬液投与



Point 02 パッドへのこだわり

穿刺手技に適したパッドを新開発

静脈留置針の刺入に適した素材を研究し、パッドを新開発。穿刺した際の感触だけでなく、ドレッシングの貼付まで行える画期的なパッドで、準備やメンテナンス性も考慮したつくりです。




パッド交換が簡単



血管の怒張を表現



皮膚の伸展

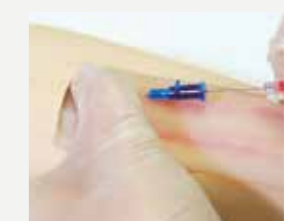

静脈の圧迫操作



静脈留置針の固定

Point 03 必要器具を付属

「点滴静注シミュレータ器具セット」(5名分) を付属

留置針を使った点滴静脈注射・薬液投与の演習をすぐに行えます



届いたらすぐに演習ができます！



実習用アンプル・バイアル



(写真手前から) シリンジ/静脈留置針/注射針



フィルムドレッシング



患者識別バンド

静脈留置針 (22G)	10本 (2本×5)
注射針 (18G)	5本 (1本×5)
シリンジ (5ml)	5本 (1本×5)
フィルムドレッシング (固定用テープ2本付)	10枚 (2枚×5)
実習用アンプル (2ml 注射液タイプ/5ml 注射液蒸留タイプ)	各5本 (各1本×5)
実習用バイアル (注射液タイプ/溶解薬剤タイプ)	各5本 (各1本×5)
患者識別バンド	5本 (1本×5)