

点滴静注シミュレータ“Vライン”収納時のご注意

使用後は、付属の収納バッグに下記のように収納し、高温多湿を避けて保管してください。

- ① ご使用後は汚れを取り十分に乾燥させ、腕モデル本体(注射パッドは装着)を元々包んであった保護用の袋に入れ収納バッグ内に収めます。



注：収納バッグの色が腕モデルに付着したり、固いものに触れて変形するのを避けるため、必ず袋内に収めてください。



- ② 腕モデル本体を収納バッグに入れた後、付属の収納用中仕切りを写真のように腕モデル本体の下に差し込みます。



収納用
中仕切り


- ③ 仕切りをはさんで、組み合わせた模擬血液用ボトル他(下段写真参照)を収め、空いたスペースにその他の構成部品も収納します。

(取扱説明書も収納バッグに収めご活用ください)



収納用
中仕切り

注：中仕切りは、腕モデル本体が硬いものに触れて圧迫され変形するのを避けるため、必ず入れてください。

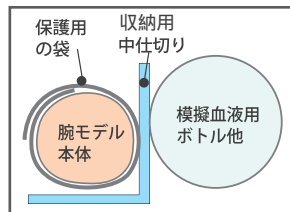

模擬血液用ボトル、模擬血液用ボトル設置台、ディスプレイポカッは下の写真のように組み合わせ収納してください。未使用の模擬血液はビニール袋の中に入れてしっかり密閉し、収納バッグに収め保管してください。



注：高温多湿な場所での保管は避けてください。



模擬血液用
ボトル設置台
ディスプレイポカッ



模擬血液

模擬血液用
ボトル

点滴静注シミュレータ“Vライン” 納品時のご確認


納品時は下記のように梱包されていますので、順次構成部品を取り出し内容をご確認ください。

- ① 収納用の段ボール箱上段には点滴静注シミュレータ器具セットが5組と、下段にはシミュレータの収納バッグがセットされています。



- ② 収納バッグ内には点滴静注シミュレータの構成品がセットされています。

納品時の構成品

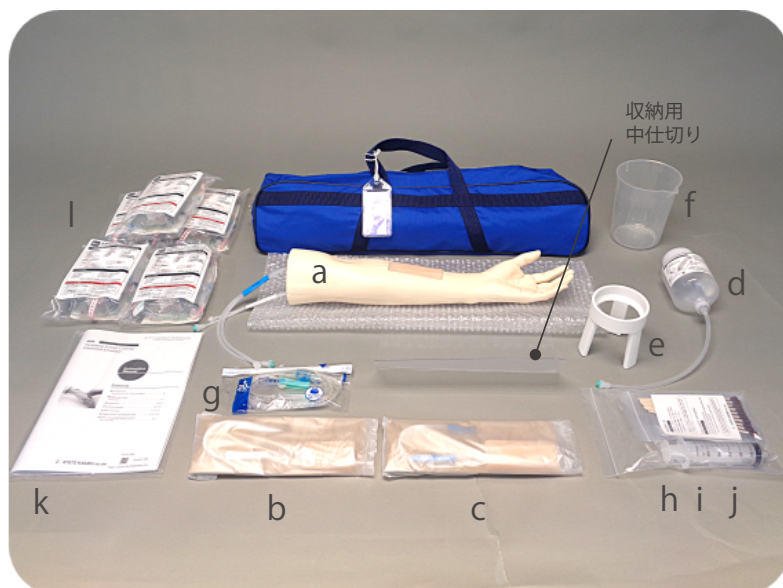

- | | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| a. 腕モデル (2種の注射パッド含) | d. 模擬血液用ボトル | g. 輸液セット | j. 模擬血液 (綿棒タイプ) |
| b. 手背静脈部 注射パッド | e. 模擬血液用ボトル設置台 | h. 輸液袋 | k. 取扱説明書 |
| c. 前腕正中皮静脈部 注射パッド | f. ディスポカップ | i. シリンジ (50mL・ロック式) | l. 点滴静注シミュレータ器具セット (5組) |

本製品についてのお問い合わせや不具合等がございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店、もしくは下記(株)京都科学までご連絡ください。

2024.11

 **KYOTO KAGAKU co.,LTD**

〒612-8388
京都市伏見区北寝小屋町15番地
075-605-2510
FAX: 075-605-2519

〒113-0033
東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
03-3817-8071
FAX: 03-3817-8075



京都科学

検索

<http://www.kyotokagaku.com>



rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp



フェイスブックでフォローしてください
facebook.com/kyotokagaku